

Umbau
innerhalb
kürzester
Zeit!

Unitos Smart Testversorgung in wenigen Minuten

Mehr Sicherheit für Ihre Patienten –
mit geringstem Aufwand für Sie.




Wir bereiten das System für Sie so vor, dass der Umbau
bei Ihnen vor Ort **in wenigen Minuten** möglich ist.



Kein Vorbereitungs Aufwand

Sie geben lediglich Bauhöhe, Seite
und Fußgröße durch –
alles Weitere übernehmen wir.

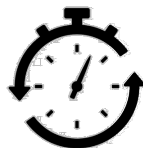

Umbau in wenigen Minuten

Die Testversorgung lässt sich
schnell und unkompliziert in Ihren
Arbeitsalltag integrieren.



Begleitung bei der Testversorgung

Wir unterstützen Sie für einen
reibungslosen Ablauf.

SO EINFACH FUNKTIONIERT DIE TESTVERSORGUNG


1



Maße durchgeben

Bauhöhe, Seite,
Fußgröße
(siehe Rückseite)

2

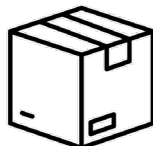

System wird vorbereitet

Individuell für Sie
montagefertig

3



Test vor Ort

Schneller Umbau –
in der Werkstatt oder
beim Patienten



Das Unitos Smart schließt die Versorgungslücke zwischen einfachen
mechanischen Kniegelenken und komplexen High-End-Systemen –
Ideal für **geriatrische Anwender mit Mobilitätsgrad 1 und 2-**

EINFACH TESTEN – OHNE RISIKO

Wir begleiten Sie bei der Versorgung.



Johannes Klopf
+49 170 2942559
j.klopf@standpunkt.net
www.standpunkt.net

SO EINFACH GEHT'S: 3 MAßE – FOTO – SENDEN.



1 3 MAßE EINTRAGEN

BAUHÖHE
Oberkante Pyramide bis Fußsohle (ohne Schuh)
..... cm

SEITE
rechts links

FUßGRÖßE
..... cm

2 ABFOTOGRAFIEREN

3 ABSENDEN

Einfach und unkompliziert über Ihren bevorzugten Kanal.

✓ FERTIG!
Wir bereiten Ihr Testsystem montagefertig für Sie vor.

Signal WhatsApp SMS E-Mail

+49 170 2942559 info@standpunkt.net

FLEXIBEL EINSETZBAR – AUCH AUSSERHALB DER WERKSTATT
Ideal für geriatrische Anwender und den Einsatz im **häuslichen** oder **pflegerischem Umfeld**.

STANDPUNKT

